


## FICHA TÉCNICA

<b>DESINFECTANTE DISPOSITIVOS MÉDICOS BESTDENT</b>		
<b>REFERENCIA</b>	<p><b>60157:</b> Desinfectante Dispositivos médicos BESTDENT 1L.</p> <p><b>60158:</b> Desinfectante Dispositivos médicos BESTDENT 5L.</p>	
<b>CLASIFICACIÓN</b>	Producto Sanitario Clase IIa según la Directiva 93/42/CEE relativa a productos sanitarios.	
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Desinfectante Dispositivos médicos BESTDENT (1L y 5L)	
<b>COMPOSICIÓN</b>	<p><b>100 g de producto contienen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 43,0 g de etanol; 8,0 g de 1-Propanol;</li> <li>• 0,055 g de cloruro de didecildimetilamonio.</li> </ul>	
<b>ENVASE</b>	Disponible en presentación en envase en spray de 1L y garrafa de 5L.	
<b>FINALIDAD PREVISTA</b>	Desinfectante rápido alcohólico listo para usar para la desinfección profiláctica de superficies de dispositivos médicos resistentes al alcohol en el sector médico. No apto para la desinfección final (terminal) de dispositivos médicos invasivos.	
<b>INSTRUCCIONES DE USO</b>	<p>Aplicar el desinfectante de superficies rápidas de modo que cubra toda la superficie. Luego, dejar que el desinfectante actúe durante el tiempo de contacto especificado. Para la desinfección con paños, humedecer muy bien un paño con la solución desinfectante y limpiar las áreas o aplicar la solución directamente en el área y luego limpiar. Todas las superficies a desinfectar deben estar completamente mojadas y cubiertas. Adecuado para el sector médico. Solo es adecuado para su uso en materiales resistentes al alcohol (no es adecuado, por ejemplo, para el vidrio acrílico).</p> <p><b>Tiempos de contacto:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bacterias según EN 13727 y EN 13697: Conc. 1 min.</li> <li>- Candida albicans según EN 13624 y EN 13697: Conc. 1 min.</li> <li>- Inactivación de TB (Tuberculosis) (M. terrae) según DGHM: Conc. 1 min.</li> <li>- Virus con envoltura (por ejemplo, HBV, HIV, HCV) según RKI/DVV y EN 14476 en condiciones limpias: Conc. 2 min.</li> <li>- Norovirus (EN 14476, condiciones limpias): Conc. 1 min.</li> <li>- Tiempos de contacto para desinfección mediante aplicación con paños: Bacterias y Candida albicans según VAH y EN 16615: Conc. 5 min.</li> </ul>	
<b>INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD</b>	H226 Líquido y vapores inflamables. Mantener alejado de fuentes de calor/chispas/llamas/superficies calientes. No fumar. Mantener el envase bien cerrado. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con cuidado con agua durante varios minutos. Si lleva lentes de contacto y resulta fácil, quitarlas. Continuar enjuagando. Almacenar el envase bien cerrado en un lugar bien ventilado. Desechar el contenido/envase de acuerdo con las regulaciones nacionales/internacionales.	
<b>CONDICIONES DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO</b>	<p>Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar directa y de fuentes de calor. Proteger de la humedad.</p> 